

AED BeneHeart řada C & S Stručná referenční příručka

1



Ověřte, zda pacient nereaguje, nedýchá nebo nedýchá normálně.

**VOLEJTE ZDRAVOTNICKOU
ZÁCHRANNOU SLUŽBU!** 155

obdržíte kód pro otevření skřínky


2



Otevřete víko přístroje.

3

Přiložte
elektrody.

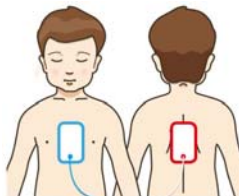

Je-li výboj doporučen

Plně automatický model:
Přístroj automaticky podá
výboj pacientovi.

Poloautomatický model:
Do 30 s stiskněte
tlačítko Výboj.



4

Podejte
výboj.

Není-li výboj doporučen

Provádějte resuscitaci podle pokynů.



046-017691-00(2.0)

mindray